

BECKMAN COULTER

Bakım Çizelgesi

Bakım	Tarih :																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Günlük																																								
Numune gönderici, reaktif gönderici veya yıkama suyu göndericide herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etme																																								
Deterjan döner pompa biriminde herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etme																																								
Esas deterjan miktarının kontrol edilmesi ve doldurulması																																								
Numune probu, reaktif probları ve karıştırma çubuklarının kontrol edilmesi ve temizlenmesi Yazıcı ve Kaidin Manuel Olarak Kontrol Edilmesi																																								
Haftalık1																																								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Numune probu ve karıştırma çubuklarının manuel olarak temizlenmesi																																								
W2'nin Gerçekleştirilmesi (Her bir probun, karıştırma çubuğunun ve küvet vs'nin otomatik yıkanması)																																								
Photocal ölçümünün gerçekleştirilmesi																																								
Numune ön seyreltme iyesinin temizlenmesi																																								
Aylık1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Numune Probu ve Reaktif Probu Yıkama stasyonlarının Temizlenmesi																																								
HbA1c prob yıkama istasyonlarının temizlenmesi																																								
Karıştırma Çubuu Yıkamastasyonunun Temizlenmesi																																								
Yıkama azı biriminin temizlenmesi ve tüp montaj balantılarının kontrol edilmesi																																								
Deiyonize Su Filtresinin Temizlenmesi																																								
Numune Probu Filtresinin Temizlenmesi																																								
Üç Ayda Bir		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Hava Filtrelerinin Temizlenmesi																																								
Deiyonize Su Filtresinin Deitirilmesi																																								
Numune Probu Filtresinin Deitirilmesi																																								
Deiyonize Su Tankının Temizlenmesi																																								
Deterjan Döner Tüpünün Deitirilmesi																																								